

歯科材料 1 歯科用金属
管理医療機器 歯科非铸造用チタン合金 JMDN コード：70795000
MOON CAD/CAM チタンディスク(純チタン 2 種)

【禁忌・禁止】

本品の類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：ディスク状

直径：98.5mm

厚み：10mm, 12mm, 14mm

成分	含有量 (wt%)
	純チタン (2 種)
鉄	0.25 以下
炭素	0.08 以下
窒素	0.03 以下
酸素	0.20 以下
水素	0.013 以下
その他	0.40 以下
チタン	残部
合計	100.0

【使用目的又は効果】

歯科修復物、補綴物又は装置の作製に用いる。ただし、歯科用インプラント又は歯科用インプラントアパットメント作製に用いるものを除く。

【使用方法等】

- 本品を歯科技工用 CAM 機に固定し、加工を開始する。
※歯科技工用 CAM 機の使用法などは、CAM 機に付属する添付文書及び使用説明書等を参照すること。
- 加工した歯冠修復物、補綴物又は支台装置等を、適切なバー等を使用して切り出す。
- 通法に従って形態修正・研磨を行う。

【使用方法に関連する使用上の注意】

本品に油分・ほこりなどが付着している場合には、きれいに拭き取ってから使用すること。

【使用上の注意】**【使用注意】**

- 本品を切削・研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可したマスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 本品を切削・研磨する際には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等の防具を使用すること。
- 本品に割れ、欠けが生じた際には、手などを切る恐れがあるので注意すること。
- 本品や類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、使用の際に直接皮膚に触れないように保護具を着用すること。

【重要な基本的注意】

本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰症、腫瘍、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた患者又は術者においては、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせるか、又は受けること。

【不具合・有害事象】**有害事象**

有害事象として掌跖膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎等の歯科金属湿疹(遅延型金属アレルギー性疾)を発症することがある。

【保管方法及び有効期間等】**【貯蔵・保管方法】**

- 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。
- 誇り、塩分、水分を多く含んだ空気による悪影響を生ずる恐れのない場所、及び外圧のかからない場所に保管すること。
- 本品は、品質保持のため高温・多湿・直射日光の当たる場所を避け、室内で清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**【製造販売元】**

城北冶金工業株式会社

住所 〒351-0014

埼玉県朝霞市膝折町 2-11-68

電話番号048-461-7576(代)